

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
POUR SCANNER VOTRE SOURIRE
PARFAITEMENT AVEC
DENTAL MONITORING[®]

by DentalMind





COMMENT UTILISER CORRECTEMENT VOTRE ÉCARTEUR DE JOUES DM ?

Quelques conseils...

1

TAILLE



A faire : Utilisez toujours un écarteur de joues adapté à la taille de votre mâchoire. Si vous n'êtes pas à l'aise, consultez votre praticien.



A ne pas faire :

- N'utilisez pas un écarteur de joues **trop petit**. Toutes les dents ne seront pas visibles.
- N'utilisez pas un écarteur de joues **trop grand**. Cela pourrait être douloureux ou vous blesser.



2

POSITION



A faire : Tenez-vous devant un miroir, insérez votre écarteur de joues, arche orientée vers le bas et inserts métalliques face au miroir.



A ne pas faire :

- N'insérez pas votre écarteur de joues dans votre bouche avec l'arche orientée vers le haut.
- N'insérez pas votre écarteur de joues avec les inserts métalliques tournés face à vous.



Insérez complètement votre écarteur de joues.
Il est nécessaire de porter votre écarteur de joues avant de procéder au scan.

3

INSERTION



A faire : Insérez votre écarteur de joues d'un côté puis d'un autre.



A ne pas faire :

- N'insérez pas votre écarteur de joues des deux côtés en même temps.
- N'insérez pas votre écarteur de joues sur vos dents.





COMMENT SCANNER AVEC VOTRE SCANBOX DM ?

Votre confort est important pour nous, vous trouverez ci-dessous quelques règles pour utiliser facilement votre ScanBox.

Une vidéo tutorielle est également disponible sur notre chaîne YouTube.

- 1 Placez-vous devant un miroir et ouvrez votre application Dental Monitoring. Placez votre smartphone dans la ScanBox et sécurisez-le.



A faire :

- Vérifiez que la pièce dans laquelle vous vous trouvez est suffisamment lumineuse.
- Augmentez le volume de votre smartphone et vérifiez que votre téléphone n'est pas réglé sur le mode silencieux.
- Assurez-vous que l'objectif de votre appareil photo est **aligné avec la flèche** de la ScanBox.



A faire :

- Retirez l'étui de votre smartphone (si vous en avez un), il pourrait ne pas tenir dans la ScanBox.



2

Insérez votre écarteur de joues et connectez votre ScanBox à ses inserts métalliques. Vous entendrez un « clic » lorsqu'ils seront correctement fixés l'un à l'autre.



A faire :

- Vos molaires doivent être visibles.
- Votre écarteur de joues doit maintenir vos lèvres écartées de vos dents.



- Placez votre ScanBox en position verticale.



3

Tapez deux fois sur votre écran pour commencer à scanner et écoutez attentivement les instructions de votre application.



4

Lorsque vous entendez le son de votre appareil photo, vous pouvez commencer à déplacer votre ScanBox.



A faire :

- Votre mouvement doit être large - d'une oreille à l'autre - pour que toutes vos dents soient scannées.
- Votre mouvement doit rester centré, seuls votre ScanBox et votre téléphone bougent.



- Votre mouvement doit suivre la vitesse de la jauge sur l'écran de votre smartphone.



5

Les différentes positions possibles pendant un scan.



A faire :

- Bouche légèrement ouverte : laissez l'espace d'un doigt entre vos dents supérieures et inférieures.



- Bouche fermée : mordez (vos dents supérieures et inférieures sont serrées et bien visibles).





A ne pas faire :

- Laissez votre langue devant vos dents.

6

En cas de besoin, vous pouvez recommencer votre scan en appuyant sur le bouton de « réessayer ».



A faire :

- Laissez suffisamment de temps pour le téléchargement avant de fermer l'application.



Si vous avez des questions concernant Dental Monitoring et votre processus de scan, votre praticien et son équipe sont les premières personnes à contacter. Grâce à votre application Dental Monitoring, ils savent exactement comment votre traitement évolue. Pour toute question technique concernant l'application, le Service Client de Dental Monitoring est également à votre disposition pour vous aider.

DENTAL MONITORING[®]

by DentalMind

L'application Dental Monitoring est disponible sur l'Apple Store et sur Google Play.



Notre service client est à votre écoute :

E-mail : support@dental-monitoring.com

Téléphone : + 33 1 86 95 01 01

dental-monitoring.com



TR_HDW_BR_002_01_rd_P_FR_fr

L'écarteur de joues DM Cheek Retractor et la DM ScanBox sont des produits conçus et fabriqués par Dental Monitoring SAS, sous la marque DentalMind. Le DM Cheek Retractor est conçu pour tirer les joues et les lèvres des surfaces buccales et labiales des dents et des gencives lors des procédures de prise de vue effectuées avec les solutions commercialisées par Dental Monitoring. Consultez votre HCP et/ou l'IFU avant utilisation. La DM ScanBox est un accessoire (facultatif) conçu pour être couplé à un smartphone afin de réaliser des procédures de prise de vue effectuées avec des solutions commercialisées par Dental Monitoring. Le DM Cheek Retractor et la DM ScanBox sont des dispositifs médicaux, enregistrés en tant que tels et portant la marque CE en Europe ou listés à la FDA, aux États-Unis (par exemple). La disponibilité des produits, leurs revendications et leur statut réglementaire peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des réglementations locales. Contactez votre représentant local pour de plus amples informations.